

Bloxivir

Гел спрей за нос

Bloxivir®

БАРИЕРА
СРЕЩУ
ВИРУСИТЕ*

Блоксивир е медицинско изделие, предназначено за ежедневна защита срещу вирусни инфекции, както и за борба с активни вирусни инфекции. Може да се използва няколко пъти на ден, както за профилактика, така и за лечение при възрастни и деца над 1 година.

След прилагането му върху устната лигавица създава защитен слой, който представлява механична бариера за патогени, като съдържащите се в него вещества: йота-карагенан, натриев хиалуронат и ектоин, ги неутрализират. В резултат Блоксивир предпазва от силно инфекциозни вируси, облекчава симптомите на инфекцията и съкращава нейната продължителност. Поради това, той е метод както за предотвратяване, така и за борба срещу вирусни инфекции на горните дихателни пътища, причинени, наред с други, от грипни вируси и коронавируси, включително SARS-CoV-2. Използването на продукта от заразени (също така безсимптомни) лица намалява риска от заразяване на други.

Блоксивир е първият по рода си гел спрей за нос, който предпазва, предотвратява и се бори с вирусното възпаление благодарение на три вещества, тествани в клинични изпитвания.

Съставки, отговорни за действието на продукта:

Йота-карагенан, натриев хиалуронат, ектоин

Помощни вещества: пропилен гликол, лимонена киселина, натриев хидроген фосфат, натриев фосфат, вода и консерванти.

Показания

1. ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСИ

- Блокира проникването на вируси в клетките и следователно предпазва от силно инфекциозни вирусни инфекции на горните дихателни пътища (грип и настинки, причинени от грипен вирус и коронавируси, както и от COVID-19, причинен от коронавируса SARS-CoV-2).
- Предпазва от разпространението на вируса (чрез ограничаване на предаването от симптоматични или асимптоматични хора към други).
- Предпазва от сухота и дразнене на носната лигавица от фактори на околната среда.

Профилактично, за да се подпомогнат правилните физиологични функции на носната лигавица.

2. ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ НА ИНФЕКЦИЯТА И ПОДКРЕПАЩО ЛЕЧЕНИЕ

- Блокира размножаването на вирусите и по този начин предотвратява появата на симптоми на заболяването.
- Облекчава симптомите на вирусни инфекции на горните дихателни пътища, включително възпаление на носната лигавица, свързано с повишено производство на слюз, причиняващо ринит и течащ нос.
- Поддържащо лечение на остър или хроничен и обострящ се параназален синусит, алергичен ринит.

3. СЪКРАЩАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

- Намалява продължителността на заболяването, причинено от бактериални или вирусни инфекции на носната лигавица.
- Намалява вероятността от развитие на бактериална суперинфекция, която често следва вирусната инфекция.

Механизъм на действие

Носната лигавица формира първата физическа бариера на тялото и първата защитна линия на имунната система. Благодарение на специалната си структура и производството на слюз, тя почиства дихателните пътища от вдишани вредни за здравето вещества и предотвратява проникването и разпространението на вируси, бактерии и гъбички. Въздухът, който вдишваме през носа, се почиства, овлажнява и затопля, което е от решаващо значение за работата на цялата дихателна система.

Носната лигавица изпълнява своята защитна функция само когато е в добро физиологично състояние, т.е. когато е добре овлажнена. Тъй като сухият и горещ въздух, замърсителите, токсичните пари във вдишания въздух и локалното използване на назални деконгестанти дразнят и изсушават носната лигавица.

Възрастните хора са особено уязвими към неблагоприятните фактори на околната среда, тъй като страдат от постепенна атрофия на лигавицата (т.нар. „сух нос“), което води до увреждане на носната лигавица и насърчава развитието на вирусни и бактериални инфекции.

Увредената носна лигавица не изпълнява основната си функция и увеличава риска от остри и хронични инфекциозни заболявания, включително чести сезонни вирусни инфекции на носа или гърлото. Когато носната лигавица е увредена, тя е склонна към инфекции с различни видове вируси, включително коронавируси и SARS-CoV-2 вирус, който причинява заболяването COVID-19, както и вируси, които могат да причинят грип или настинки. Вирусът, в подходяща среда, прониква в клетките-гостоприемници и се размножава, което води до появата на симптомите на заболяването.

Можете обаче да се предпазите от инфекция чрез ежедневна профилактика. За тази цел е създадено медицинското изделие Блоксивир, което защитава, предотвратява и се бори с вирусното възпаление благодарение на трите си активни съставки, чието действие е потвърдено в клинични изпитвания.

* (грипни вируси и коронавируси)


След разпръскването на продукта върху носната лигавица се създава защитен слой, който поддържа естествената й бариера и представлява механична бариера срещу проникването в тялото и размножаването на патогени. Защитният ефект започва веднага след приложението на продукта.

Начин на употреба

Измийте ръцете си преди нанасяне.

Преди първата употреба на спрея, след отстраняване на капачката, натиснете дозатора около 5 пъти последователно, докато се появи гел.

Докато държите главата си изправена (без да я наклоняте назад), поставете върха на дозатора в ноздрата, но избягвайте да блокирате отвора ѝ изцяло. Насочете върха на дозатора срещу носната преграда (стената между ноздрите), т.е. в посока на дясното око в случай на дясната ноздра и в посока на лявото око в случай на лявата ноздра. Натиснете дозатора, който ще разпръсне дозата от продукта в носната кухина.

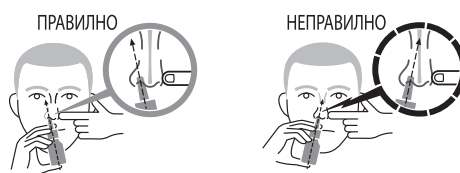

Препоръчителното количество е 1 доза (впръскване) от гела във всяка ноздра в интервал от 4-5 часа между приложението.

Опаковката от 20 мл съдържа 200 дози от продукта.

Защитният ефект започва веднага след приложението на продукта.

Използвайте няколко пъти на ден както терапевтично, така и профилактично.

След като отстраните пулверизатора от бутилката, го измийте със сапунена вода, изплакнете го няколко пъти, изсушете го и го използвайте отново, след като го прикрепите към бутилката с продукта.

Продуктът е предназначен за възрастни и деца над 1 година.

В случай на симптоми на дискомфорт, прекратете употребата на продукта.

В случай на някакви притеснения се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

По хигиенни и епидемиологични причини една опаковка трябва да се използва само от един потребител.

Медицинско изделие, предназначено за използване само в носната кухина – да не се яде.

Ако използвате по-висока от препоръчаната доза на медицинското изделие

По-високата доза от медицинското изделие не представлява заплаха.

При деца до 12-годишна възраст продуктът трябва да се използва под наблюдението на възрастен.

Следвайте препоръчания начин на употреба.

Противопоказания

- Не използвайте, ако сте алергични към съставките, съдържащи се в медицинското изделие.
- Не използвайте, ако се появят симптоми на сърбеж или парене след използване на продукта, което може да е индикация за алергия към съставките на медицинското изделие; в такъв случай **ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА**.
- Избягвайте случайния контакт на продукта с очната лигавица.
- Не използвайте заедно с други препарати за назална употреба без консултация с лекар.
- Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не използвайте, ако опаковката е повредена.
- Не използвайте, ако опаковката е била повредена или подправена преди първото отваряне.
- Ако симптомите на сухота и дразнене на носната лигавица се влошат, се консултирайте с лекар специалист.
- Продуктът е предназначен за педиатрична употреба. При употреба от деца е необходимо наблюдение от родител / настойник.

Съдържание на опаковката

Опаковката на продукта съдържа бутилка с гел заедно с инструкции за употреба.

Наличен обем на продукта: 20 мл в стъклена бутилка.

Съхранение

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка.

Съхранявайте при стайна температура 15-25°C.

Предпазвайте от източници на светлина и топлина.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте продукта, ако непосредствената опаковка е повредена.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ



Производител:
LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Aleje Zygmunta Krasińskiego 14/3a
30-101 Краков, Полша
тел. / факс +48 (12) 283 88 60

Дистрибутор:
Софарма Трејдинг АД,
ул. Лъчезар Станчев 5,
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12,
гр. София 1756



Дата на актуализиране: 05.2021

Информация на опаковката